

**EGZAMIN ZAWODOWY  
Rok 2022  
ZASADY OCENIANIA**

**Arkusz zawiera informacje prawnie chronione  
do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych**  
Oznaczenie arkusza: **MED.12-01-22.01-SG**  
Oznaczenie kwalifikacji: **MED.12**  
Numer zadania: **01**  
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA  
2019**

*Wypełnia egzaminator*

Kod ośrodka  -

Kod egzaminatora

Data egzaminu   
*Dzień Miesiąc Rok*

Godzina rozpoczęcia egzaminu  :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

\* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

## Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przełącz niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Numer  
stanowiska


**Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny**

*Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił*

**Rezultat 1: Karta mycia i dezynfekcji**

*Wpisane:*

1	w kolumnie <b>A</b> , w wierszach: zestaw do przepukliny, zestaw kostny, zestaw do laparotomii, zestaw do migdałków, zestaw do cięcia cesarskiego, zestaw do pęcherza						
2	w kolumnie <b>B</b> , w wierszach: zestaw do przepukliny, zestaw kostny, zestaw do laparotomii: <b>1, 782</b>						
3	w kolumnie <b>C</b> , w wierszach: zestaw do przepukliny, zestaw kostny, zestaw do laparotomii: <b>90°C, 5 min</b>						
4	w kolumnie <b>D</b> , w wierszach: zestaw do migdałków, zestaw do cięcia cesarskiego, zestaw do pęcherza: <b>NIE</b>						
5	w kolumnie <b>D</b> , w wierszach: zestaw do przepukliny, zestaw kostny, zestaw do laparotomii: <b>Tak</b>						
6	w kolumnie <b>E</b> , w wierszach: zestaw do przepukliny, zestaw kostny, zestaw do laparotomii: <b>Prawidłowy</b>						
7	w kolumnie <b>E</b> , w wierszach: zestaw do migdałków, zestaw do cięcia cesarskiego, zestaw do pęcherza: <b>Nieprawidłowy</b>						
8	w kolumnie <b>F</b> , w wierszach: zestaw do przepukliny, zestaw kostny, zestaw do laparotomii: <b>Tak</b>						
9	w kolumnie <b>F</b> w wierszach: zestaw do migdałków, zestaw do cięcia cesarskiego, zestaw do pęcherza: <b>Nie</b>						

Numer  
stanowiska


### Rezultat 2: Karta sterylizacji

Wpisane:

1	w kolumnie <b>A</b> : wyłącznie: zestaw do przepukliny, zestaw kostny, zestaw do laparotomii						
2	w kolumnie <b>B</b> , w wierszu: zestaw do przepukliny: dwie warstwy papieru krepowanego						
3	w kolumnie <b>B</b> , w wierszu: zestaw kostny: kontener sterylizacyjny/kontener						
4	w kolumnie <b>B</b> , w wierszu: zestaw do laparotomii: dwie warstwy włókniny						
5	w kolumnie <b>C</b> dla zestawu do przepukliny: 1 miesiąc od daty egzaminu, dla zestawu kostnego: 6 miesięcy od daty egzaminu, dla zestawu do laparotomii: 3 miesiące od daty egzaminu <i>Kryterium należy uznać za spełnione jeżeli zapisano datę z dokładnością +/- 2 dni.</i>						
6	w kolumnie <b>D</b> , w trzech wierszach: <b>1, 920</b>						
7	w kolumnie <b>E</b> , w trzech wierszach: <b>134°C, 4 min, 210/210,0 kPa</b>						
8	w kolumnie <b>F</b> , wyłącznie w trzech wierszach: <b>Prawidłowy</b>						
9	w kolumnie <b>G</b> , wyłącznie w trzech wierszach: <b>Tak</b>						

### Rezultat 3: Protokół przekazania zestawów operacyjnych na Blok Operacyjny

Wpisane:

1	Data sporządzenia protokołu dzień-miesiąc-rok: data egzaminu						
2	w kolumnie Nazwa zestawu: zestaw do przepukliny, zestaw kostny, zestaw do laparotomii						

Numer  
stanowiska


**Rezultat 4: Etykieta roztworu środka dezynfekcyjnego**

Wpisane:

1	Nazwa środka dezynfekcyjnego: Virusolve+ Koncentrat						
2	Stężenie roztworu: 5%						
3	Czas dezynfekcji: 10 minut						
4	Skład roztworu – ilość wody (ml): 2850 ml						
5	Skład roztworu – ilość koncentratu środka dezynfekcyjnego (ml): 150 ml						
6	Data przygotowania roztworu dzień-miesiąc-rok: data egzaminu						
7	Godzina przygotowania roztworu: godzina rzeczywista egzaminu						

www.EgzaminZawodowy.info

Numer stanowiska							

**Przebieg 1: Wykonanie higienicznej dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a, przygotowanie roztworu roboczego preparatu Virusolve+ Koncentrat, dezynfekcja manualna zanurzeniowa narzędzi i czyszczenie kleszczyków Pean**

Zdający:

1	zastosował środki ochrony indywidualnej: czepek, maseczkę, gogle/przyłbicę, fartuch flizelinowy, fartuch foliowy						
2	naniósł środek dezynfekcyjny na suchą dłoń/dłonie i wykonał następnie 6 etapów dezynfekcji rąk, powtórzył każdy z sześciu etapów dezynfekcji rąk minimum pięciokrotnie, założył rękawiczki						
3	wlał do wanienki dezynfekcyjnej 2850 ml wody wodociągowej, odmierzył za pomocą miarki 150 ml środka dezynfekcyjnego <i>Virusolve+ Koncentrat i wlał do wanienki z wodą; zamieszał kilkakrotnie roztwór za pomocą mieszadła</i>						
4	otworzył kleszczyki Pean i igłotrzymacz; zanurzył w roztworze Virusolve+Koncentrat: kleszczyki Pean, igłotrzymacz i pęsetę chirurgiczną, zamknął wanienkę pokrywą, odczekał 10 minut (czas dezynfekcji narzędzi) <i>Uwaga: Ze względu na czas trwania egzaminu, egzaminator może skrócić czas dezynfekcji narzędzi.</i>						
5	wyjął narzędzia z roztworu środka dezynfekcyjnego, wyczyścił kleszczyki Pean przy pomocy szczoteczki						
6	wypłukał kleszczyki Pean, igłotrzymacz i pęsetę chirurgiczną wodą demineralizowaną, odłożył narzędzia na tacę narzędziową						
7	wylał roztwór z wanienki dezynfekcyjnej, wypłukał wodą wanienkę oraz perforowany wkład, wysuszył wanienkę oraz perforowany wkład papierowymi ręcznikami, zdezynfekował suche powierzchnie wanienki i wkładu chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekcyjnym						
8	osuszył papierowymi ręcznikami blat, następnie zdezynfekował blat chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekcyjnym, wyrzucił papierowe ręczniki oraz chusteczki do dezynfekcji powierzchni do pojemnika wyłożonego czerwonym workiem						
9	zjął środki ochrony indywidualnej, rozpoczynając od rękawic i fartuchów ochronnych, a następnie wyrzucił je do pojemnika wyłożonego czerwonym workiem						
10	zdezynfekował ręce po zdjęciu i wyrzuceniu środków ochrony indywidualnej, wykonując 6 etapów dezynfekcji rąk techniką Ayliffe'a						

Egzaminator .....

*imię i nazwisko*

.....

*data i czytelny podpis*